



TÁJÉKOZTATÓ OPTIKÁK RÉSZÉRE

Kérjük minden esetben tartsa be az alábbi utasításokat, ugyanis így tudjuk biztosítani a felhasználó részére a szemüveg hosszú élettartamát. Ha bármi kérdés ezen kívül felmerülne, nyugodtan keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén:


E-mail: thinwood@thinwood.hu
Tel: (0036) 30 871-3707

LENCSÉ

Szemüvegkereteinkbe az alábbi alapanyagú szemüveglencsék valók:

- magas a törésmutatója (1.6)
- polikarbonát
- Trivex.

+4 és -4 közötti dioptriatarományt ajánlunk, ezen értékek fölött extra vékonyított lencse szükséges. A cylinder értéke maximum 2. A szemüveglencse nútja 1 mm széles és 0.8 mm mély. A lencse széle legalább 2 mm vastag kell hogy legyen. Ha a lencse tökéletes méretűre van lecsiszolva a keret két részének a találkozásánál nincsen látható rés és a szélek egy vonalban vannak.

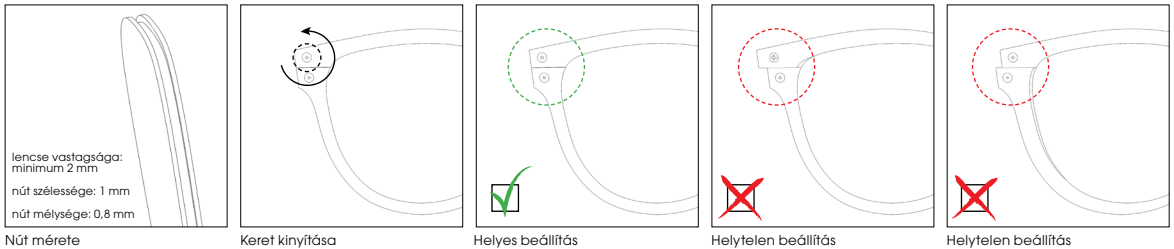


ALAPANYAG

A szemüvegkeret alapanyag nem formázható hővel, vagy egyéb más eljárással.


KERET ÍVE

A keret ívét a lencse adja. A száruk 4-es és 6-os bázisgörbületű lencsékhez vannak beállítva. Amennyiben ennél laposabb lencsét kíván belerakni, jelezze nekünk és gyártunk ehhez megfelelő szárrakkal ellátott keretet.


A szárak állítása a konzol csiszolásával történik. Ha a konzolból elvesz, a szárak jobban kinyílnak. Figyelem! Az anyagból elvenni tudunk, hozzáadni nem, így apránként, fokozatosan változtasson a konzol méretén, ha ez szükséges. Akkor van jól beállítva a szárak nyílása, ha a szár rászorít a halánték környékén a fejre, de nem látszik, hogy U alakot írna le a szár a fejhez képest.

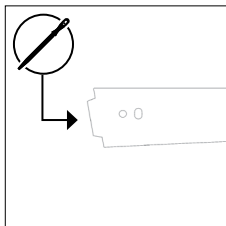


Konzol csiszolása

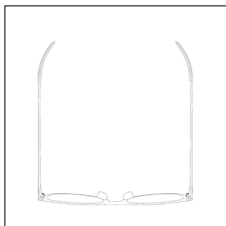


Nagyobb konzol

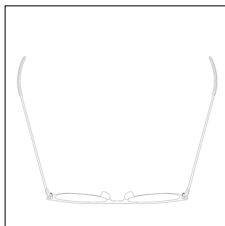

Kisebb konzol

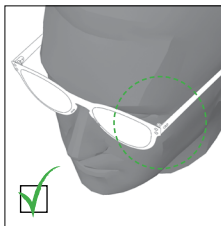


Helyes beállítás

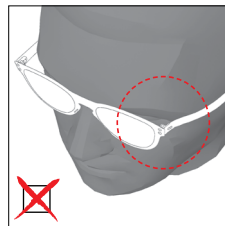


Helytelen beállítás

Eltérő fülmagasság esetén a szárvéghez közeli csavar segítségével tudja állítani a dőlésszöveget. A csavar helye nem kör, hanem kifíli alakot ír le, így annak meglazításával a kívánt dőlésszögre beállítható a szár.

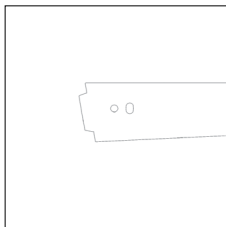

Szár állítása

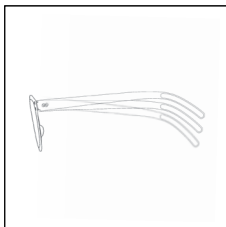

Szár állítása

ORRTÁMASZ

Az orrtámasz dőlése nem állítható. Ha a méret nem stimmel, egyedi rendelés alapján gyártunk a megadott méretek alapján keretet.

GYÁRTÓ ELÉRHETŐSÉGE

Electrolabel Kft.
Adószám: 22683706-2-03
H-6000 Kecskemét, Dombó Lajos u. 22. 2/8
Elérhetőség: (0036) 30 871-3707
Honlap: www.thinwood.hu
E-mail: thinwood@thinwood.hu